

Clearblue DIGITAL

Clearblue er mer enn 99% sikker fra den dagen du venter menstruasjonen.

Clearblue kan brukes opptil 4 dager før menstruasjonen er ventet.

Les denne bruksanvisningen nøye før du utfører en test.

GRAVIDITETSTEST

1 Utfør testen

Hvis du utfører testen samme dag som du venter menstruasjonen, kan du teste når som helst på dagen. Hvis du utfører testen tidlig, må du bruke dagens første urin.

- Når du er klar for å utføre testen, åpner du folien og tar ut testpinnen.
- Deretter tar du av den blå hetten. Bruk testpinnen med én gang.
- Når du utfører testen, må du **aldri** holde testen sånn at oppsugingsdelen peker oppover.

ENTEN

Utfør testen i urinstrålen

- Bare oppsugingsdelen skal plasseres med spissen ned i urinstrålen **i kun 5 sekunder**.
- Pass på at ikke resten av testpinnen blir våt.
- Du kan eventuelt sette hetten på plass igjen, og legg testpinnen flatt.

ELLER

Samle en urinprøve i en ren og tørr beholder

- Plasser bare oppsugingsdelen med spissen ned i urinen, som vist her, **i kun 20 sekunder**.
- Du kan eventuelt sette hetten på plass igjen, og legg testpinnen flatt.

3 Se resultatet ditt

- Resultatet ditt vises i displayet i løpet av **3 minutter**.
- Iblant kan resultat vises etter bare 1 minutt.
- Resultatet ditt vises i displayet i ca. 24 timer.

2 Vente...

- Ventesymbolet begynner å blinke for å vise at testen fungerer.
- Når ventesymbolet slutter å blinke, vises resultatet ditt. Hvis ventesymbolet ikke vises etter at du har brukt testen, se **spørsmål 5** i Spørsmål og svar.



5 seKUNDER

Oppsugingsdel



20 seKUNDER

Hette



Hvis resultatet ditt er "Gravid", se spørsmål 7 i Spørsmål og svar.

Hvis resultatet ditt er "Ikke Gravid", se spørsmål 8 i Spørsmål og svar.

Spørsmål og svar – Her finner du svar på de spørsmålene som blir oftest stillt.

Feilsymboler Les delen "Feilsymboler" hvis du har brukt testpinnen, og displayet viser følgende:



Bok



Blank

Slik kvitter du deg med en Clearblue Digital Gravitetstest

- Før du kaster testen, må du ta ut batteriet i testpinnen.
- Før inn en tynn, flat gjenstand i sprekken på baksiden av testpinnen. Bryt opp plastikkstrikelen.
- Ta ut batteriet og kast det i overensstemmelse med gjeldende gjenvinningsordninger. **Viktig:** Batteriene skal ikke plukkes fra hverandre, lades på nytt eller brennes. Må ikke svelges. Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Kast resten av testpinnen i behold til gjeldende gjenvinningsordninger for elektronisk utstyr.
- Elektronisk utstyr skal ikke brennes.



Spørsmål og svar

1. Hvor nøyaktig er Clearblue Digital Gravitetstest?

Clearblue Digital Gravitetstest er mer enn 99 % nøyaktig i tester utført i laboratorium, når den brukes fra den dagen du venter menstruasjonen.

2. Hvordan fungerer Clearblue Digital Gravitetstest?

Når du er gravid, produserer kroppen gravitetshormonet humant koriongonadotropin (hCG). Mengden hCG i kroppen øker i de tidlige stadiene av graviditeten. Clearblue kan påvise meget små mengder av dette hormonet i urinen.

3. Når kan jeg teste med Clearblue Digital Gravitetstest?

Clearblue Digital Gravitetstest kan brukes opptil 4 dager før den dagen du venter menstruasjonen. Hvis du tester før du har fått menstruasjonen, og får "Ikke Gravid" som resultat, kan du likevel være gravid. Tabellen nedenfor viser resultater fra klinisk testing av Clearblue Digital Gravitetstest med prøver fra tidlig svangerskap.

Tidlig test	
Clearblue anbefaler at du tester fra den dagen du venter menstruasjonen. Gravitetshormonet øker dog raskt i begynnelsen av graviditeten, og du kan bruke Clearblue opptil 4 dager før du venter menstruasjonen. I kliniske tester med prøver fra tidlig gravitet gav Clearblue Digital Gravitetstest følgende resultat:	
Antall dager for forventet menstruasjon	% av prøvene fra gravide kvinner som gav resultatet "Gravid"
-1	95%
-2	90%
-3	82%
-4	51%

Hvis du vil finne ut når du venter menstruasjonen, kan du regne ut den vanlige lengden på syklusen ved å telle antall dager fra den første dagen av menstruasjonen til og med den dagen før neste menstruasjon begynner.

- Hvis du har uregelmessige sykkluser, må du ta som utgangspunkt den lengste sykklusen i løpet av de siste månedene før du tester.
 - Hvis du ikke har noen anelse om når den neste menstruasjonen kommer, anbefaler vi at du tester minst 19 dager etter at du sist hadde beskyttet samleie.
 - Hvis du utfører testen samme dag som du venter menstruasjon, kan du teste når som helst på dagen. Hvis du utfører testen tidlig, må du bruke dagens første urin. Du bør unngå å drikke for mye væske før du tester.
 - Hvis resultatet blir "Ikke Gravid", og du likevel mistenker at du er gravid, se spørsmål 8.
- 4. Kan medisinering eller medisinske forhold påvirke resultatet?**
- Les alltid produktinformasjonen for eventuelt medisin som du bruker, før du utfører en test.
 - Fertiliseringsmedikamenter som inneholder hCG, kan gi misvisende resultater (disse fertiliseringsmedikamentene blir vanligvis gitt som injeksjon, og hvis det blir testet for resultat etter at du har tatt legemidler, kan resultatet bli et feilaktig "Gravid").
 - Andre fertiliseringsbehandlinger (som klomifenacitrat), smertestillende midler og hormonelle prevensjonsmidler (som for eksempel p-piller) vil sannsynligvis ikke påvirke resultatet.

- Hvis du nylig har sluttet å bruke hormonelle prevensjonsmidler, eller bruker fertilitetsbehandlinger som klomifenacitrat, kan det hende at menstruasjonen din er uregelmessig, noe som kan føre til at du tester for tidlig.
 - Hvis du nylig har vært gravid (selv om graviditeten ble avbrutt), kan du få et feilaktig "Gravid" som resultat.
 - Ektopisk svangerskap, eggstokkcyster, overgangsalderen og noen veldig sjeldne medisinske forhold kan gi misvisende resultater.
 - Hvis du får "Gravid" som resultat, kan det hende at du senere finner ut at du ikke er gravid på grunn av tap under svangerskapet, som forekomme på et tidlig stadium. Hvis du får uforutsette resultater, bør du ta dette opp med en lege.
- 5. Jeg har brukt testen, men ventesymbolet vises ikke. Hva betyr det?**
Testen er ikke utført skikkelig. Se Feilsymboler.
- 6. Jeg har brukt testen, men resultatet vises ikke i displayet. Hva betyr det?**
Resultatet skal vises i vinduet i løpet av 3 minutter. Hvis resultatet ikke vises, se Feilsymboler.
- 7. Testen viser at jeg er "Gravid". Hva bør jeg gjøre?**
Hvis resultatet er "Gravid", bør du oppsøke en lege eller jordmor som kan gi deg råd om hva du skal foreta deg.

- 8. Testen viser at jeg er "Ikke Gravid". Hva bør jeg gjøre?**
Du er kanskje ikke gravid, eller nivået på gravitetshormonet er kanskje ikke høyt nok til å bli påvist, eller du har kanskje feilberegnet hvilken dag du ventet menstruasjonen.

- Hvis du testet tidlig, må du teste igjen den dagen du venter menstruasjonen.
- Hvis menstruasjonen din er sen, kan du teste igjen etter 3 dager. Hvis denne testen viser "Ikke gravid" som resultat, og du ennå ikke har fått menstruasjonen, bør du oppsøke legen.

Feilsymboler

Bok – det er oppstått en feil under testingen.

Det kan være fordi:

- Oppsugingsdelen ikke ble holdt med spissen ned, eller testen ikke ble lagt flatt etter at den var fuktet med urin.
 - Den ble fuktet med for mye eller for lite urin. Du bør utføre testen en gang til med en ny test og passe på at du følger instruksjonene nøye.
- Blank**
Hvis det ikke vises noe i displayet etter at du har brukt testen, vennligst ta kontakt Clearblue produktrådgivning for videre informasjon.



Hvis du vil ha mer informasjon om Clearblue, kan du ringe Clearblue Produktrådgivning.

800 10 218

Samtalen er gratis

Du bør ha pakken for hånden slik at du kan oppgi produksjonsnummeret [LOT].

Samtalene kan bli tatt opp i kvalitetssikringsøyemed.

For ytterligere informasjon og generelle råd om gravitetstestspørsmål, kan du besøke vår hjemmeside:

www.clearblue.info

Denne innretning er egnet for hjemmebruk.

Kun til in vitro-diagnose.

Oppbevares i romtemperatur.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Brukes én gang.

Brukes ikke hvis folieomslaget er skadet.

Skal ikke brukes dersom forbruksdatoen er passert.

Disse instruksjonene gjelder modellnummer 506559

IVD



0843

EMC - veilednings- og produsentklæringer			Elektromagnetisk utstråling		
Test	Samsvar	Elektromagnetiskmiljøveiledning	Test	Samsvarsnivå	Elektromagnetiskmiljøveiledning
RF-utstråling CISPR 11	Gruppe 1	Clearblue Digital Gravitetstest bruker bare RF-energi til den interne funksjonen. Derfor er RF-utstrålingen veldig lav og kommer trolig ikke til å forårsake noen forstyrrelser på elektronisk utstyr som er i nærheten.	Elektrostatisk utslipp IEC61000-4-2	±6kV-kontakt ±8kV luft	Gulv bør være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dekket med et syntetisk materiale, må den relative fuktigheten være på minst 30 %.
RF-utstråling CISPR 11	Klasse B	Clearblue Digital Gravitetstest er egnet til bruk i alle virksomheter, inkludert husholdninger.	Ultrastat RF IEC61000-4-3 a)	3V/m (fra 80MHz til 2,5 GHz)	d = 1,2VP fra 80 MHz til 800 MHz d = 2,3VP fra 800 MHz til 2,5 GHz der P er transmitterens maksimale energiberegning i watt og d er den anbefalte avstanden i meter.

NOTAT a). Denne veiledningen kan ikke brukes i alle situasjoner. Elektromagnetisk overføring er påvirket av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.