

Babyplan® Fertility Gel

NO

Fertilitetsgel



Version WEB
19022024

Babyplan Fertilitetsgel er et ikke-klebende, sædcellevennlig smøremiddel, som tillater sædcellene å bevege seg på en effektiv måte frem til målområdet, for å maksimere dine sjanser for å bli gravid. Forbedrer sædcellenes bevegelse, og skaper det rette miljøet for sædcellenes overlevelse. For bruk i den fruktbare perioden av egglosningscyklussen for å fremme befruktning.

Tiltenkt bruk:

Babyplan Fertilitetsgel hjelper kroppens egne naturlige væsker ved å redusere friksjon og øke sædmotiliteten. Det er trygt å bruke for par som prøver å bli gravide. Babyplan Fertilitetsgel kan brukes før samleie for å gi fuktighet og smøring.

Bruksanvisning:

Fjern sikkerhetsforseglingen under hetten før første gangs bruk. Påfør en sjenerøs mengde på kjønnsorganene, og påfør på nytt så ofte som nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig smøring.

Bivirkninger:

Det er ingen kjente bivirkninger. Ved irritasjon eller allergisk reaksjon bør bruken avbrytes umiddelbart.















Advarsel:

Babyplan Fertilitetsgel skader ikke sædcellene. Det er ikke et prevensjonsmiddel. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved 5 - 30°C. Unngå øyekontakt.

Innhold:

Vann, hydroxyetylcellulosa, fenoksyetanol, etylhexylglycerin, natriumklorid, glycerin, potassiumklorid, natriumdihydrogenfosfat, magnesiumklorid, calciumklorid.

Forklaring av symboler på pakken:

	Oppbevaringstemperatur		Advarsel
	Må ikke brukes hvis pakken er skadet		Se bruksanvisningen
	Oppvares tørt		Batchkode
	Produsent		Ikke-steril
	Medisinsk utstyr		Beskyttes mod sollys
	Referanse nummer		Ikke gjenbruk
	Utløpsdato (måned/år)		Produksjonsdato (måned/år)

 60mlgynoseed


2292



Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal
Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:45/5

34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Tel : +90 212 428 68 48

E-mail: info@turkuazsaglik.com.tr

www.turkuazsaglik.com.tr



Filial av E-Invasion A/S

Stålkulegatan 2 E

SE-212 28 Malmö

E-mail: info@babyplan.com



Babyplan[®]

When big dreams come true it's often the little things that make the big difference. Let Babyplan help you increase your chances of getting pregnant.

Babyplan.com