

Sædcellevennlig personlig glidekrem – sikker for alle par som gjerne vil være gravide

- Klinisk testet
- pH balansert
- Parabenfri & glykolfri

INNHold

1 FertilSafe PLUS tube (75ml)

2 Gjenbrukbare applikatorer

2 Ferdigfylde (5 ml) applikatorer

+ Fullstendig bruksanvisning

Anvisninger:

FertilSafe PLUS kan appliseres før eller under samleie, og kan brukes daglig. Det kan brukes sammen med de medfølgende applikatorene, eller påføres eksternt direkte fra tuben. Les hele den medfølgende bruksanvisningen før bruk.

FertilSafe PLUS

FertilSafe PLUS har med ekspertis formulerets for å etterligne de naturlige smøringsvæsker som sædcellene skal ta seg igjennom for å befrukte ett egg, og det gir på samme gang en øket komfort under samleiet, når man prøver på å bli gravid.

FertilSafe PLUS er klinisk testet for å vise at det ikke skader, eller skaper en barriere for sædcellene, så som mange standardglidekremer gjør. FertilSafe PLUS lever opp til de strenge testkravene for pH og konsistens for at beskytte sædcellenes naturlige sikkerhet, motilitet og levedyktighet.

Ingredienser:

Vann, hydroxyetylcellulose, fenyloxyetanol, Salt fra Dødehavet, etylhexylglycerin, magnesiumklorid.

www.babystart.co.uk
Produsert i Storbritannia

VIKTIG**Viktig for gjenbrukbare applikatorer:**

- Oppbevar ikke glidekremen i de gjenbrukbare applikatorene i mer enn 30 minutter før bruken. Kast ubrukt produkt & rengjør.
- Rengjør applikatoren etter bruken ved å skylle med varmt vann.

Viktig for forutfylde 5ml applikatorer:

- Ikke bruk de forutfylde applikatorer for engangsbruk hvis 'vri av' tappen er skadet/ avbrutt.
- Kun for engangsbruk – oppbevar ikke etter åpnet, og gjenbruk ikke heller.

Viktig for 75ml tuben:

- Oppbevar aldri tuben uten at lokket er på.

Generelt:

- Oppbevares i stuetemperatur (4-30°C).
- Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen – se pakken.

Varsel:

- FertilSafe PLUS er ikke et prevensjonsmiddel. Det skader ikke sædceller, og svekker heller ikke deres funksjon.
- Hvis du opplever irritasjon; slutt med bruken omgående, og ta kontakt med din lege hvis problemet vedvarer.
- Ikke bruk FertilSafe PLUS hvis du har en pågående vaginal infeksjon.
- Hvis du for nylig har gjennomgått en vaginal operasjon, bør du høre med legen din før bruk.
- Skal kun brukes i følge anvisningene

FertilSafe PLUS er utviklet av Babystart Ltd, en av verdens ledende leverandører av in-vitro (IVD) fertilitetsprodukter og fertilitetstilskudd.

Våre ekspertforskere har utviklet FertilSafe PLUS særlig for par som prøver å bli gravide.

FertilSafe PLUS – TIPS

- Ved bruk med en applikator; administrer den med FertilSafe PLUS ca 15 minutter før samleie, så at glidekremen når å spredes.
- Vi anbefaler at du fyller den gjenbrukbare applikatoren med glidekrem så at den fylles til mellom halve og hele applikatoren. Etter hånden vil du merke hvilken mengde med produkt som blir det rette for deg.
- Når en applikator skal innføres; finn den posisjon som er den rette for deg. Noen kvinner synes å stå/ligge ned er best, eller å sitte over toalettet.

HVORDAN DU BRUKER FertilSafe PLUS

FertilSafe PLUS kan appliseres før eller under samleie, og kan brukes daglig. Det kan brukes med noen av de medfølgende applikatorne, eller påføres eksternt direkte fra tuben.

Ved bruk direkte fra tuben**Ekstern applikasjon:**


Påfør glidekremen eksternt ved å trykke ut ønsket mengde på ditt finger, og påfør deretter på de kvinnelige og/eller mannlige genitalier.

Ved bruk av ferdigfylte applikatorer for engangsbruk


1. Hold den smale delen av applikatoren oppover, og vri av enden, og kast den.
2. Før sakte inn den smale delen av applikatoren i vaginaen. Dette kan gjøres liggende, sittende (f.eks. på toalettet) eller stående.
3. Trykk sammen applikatorenden flere ganger for å frigjøre FertilSafe PLUS til vaginaen.
4. Fortsett med å holde applikatorenden sammentrykket mens den forsiktig tas ut fra vaginaen.
5. Etter bruken kastes applikatoren.

Ved bruk av gjenbrukbar applikator

1. Ta ut en av applikatorerne fra den forseglede hygieneposen.
2. Skru av korken på din FertilSafe PLUS-tube, og forleng applikatoren ved å trekke stempelet ut.
3. Sett fast applikatoren på tuben ved å feste den åpne enden på tubens dyse, og vri forsiktig medsols.

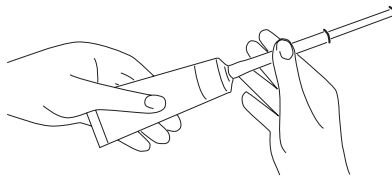

4. Trykk forsiktig på tuben til ønsket mengde glidekrem er i applikatoren.
5. Ta applikatoren bort fra tuben ved å vri motsols. Hold den åpne enden av applikatoren oppover, og skru tilbake lokket på tuben.

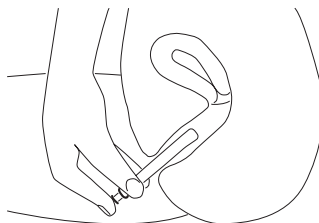

6. Før forsiktig inn applikatoren i vaginaen. Dette kan gjøres liggende, sittende (f.eks. over toalettet), eller stående. Vi anbefaler at du fører inn applikatoren kun til halvdel, for å få en jevn spredning av gelen på vaginaens sider.
7. Tryk stempelet sakte tilbake inn i applikatoren for å frigjøre all glidekrem i vaginaen.
8. Trekk forsiktig ut applikatoren fra vaginaen.
9. Etter bruken; rengjør og skyll applikatoren grundig i varmt vann.