

GRAVIDITETSTEST

Les all informasjonen i dette vedlegget før du utfører testen.

One Step Graviditetstest strimmel er en in-vitro hjemmetestingsenhet designet for rask bestemmelse av menneskelig choriogonadotropin (hCG) i urinen for å hjelpe deg med tidlig påvisning av graviditet. Lett å utføre selv. Beregnet for hjemmebruk. Kun for in-vitro diagnostisk bruk.

HVORDAN VIRKER TESTEN?

Human choriogonadotropin (hCG) er et hormon produsert av morkaken som utskilles i urin. Graviditetstesten inneholder antistoffer som spesifikt reagerer med dette hormonet.

Når den absorberende ende av testen dyppes i urinprøven, vandrer urinen langs strimlen.

Når hCG i prøven når membranen i testsonen, danner den en farget linje. Fravær av denne fargede linjen indikerer et negativt resultat.

En farget linje vises i kontrollsonen hvis testen utføres riktig.

INNHALDET I TESTSETTET

1. En pose som inneholder en teststrimmel.
2. Bruksanvisning.

HVA MER TRENGER DU?

En ren, tørr, plast- eller glasskopp for å samle urin.

Timer eller klokke.

FORHOLDSREGLER

1. Dette settet er kun beregnet på ekstern bruk. Ikke svelg.
2. Kast det etter første gangs bruk. Teststrimmelen kan ikke brukes mer enn én gang.
3. Ikke bruk testen etter utløpsdatoen som er trykt på folieposen.
4. Ikke bruk settet hvis posen punkteres eller ikke er ordentlig forseglet.
5. Oppbevares utilgjengelig for barn.

LAGRING OG STABILITET

1. Oppbevares mellom 4 °C og 30 °C i den forseglede folieposen frem til utløpsdatoen.
2. Holdes unna direkte sollys, fuktighet og varme.
3. FRYS IKKE.
4. Du må utføre testen raskt etter at du har åpnet posen. Testen må være i tørre omgivelser før bruk.

NÅR SKAL URINPRØVEN SAMLES INN?


For mange kvinner kan hCG oppdages med denne testen fra dagen etter fraværet av menstruasjon. Hver urinprøve er egnet for graviditetstester, men den første urinprøven om morgenen er optimal på grunn av sin høyeste konsentrasjon av hCG.

HVORDAN SAMLE URINPRØVE?

Urinprøven kan samles i en hvilken som helst ren, tørr, plast- eller glasskopp.

HVORDAN UTFØRES TESTEN?

1. Teststrimmelen og urinen skal være rundt romtemperatur før testing.
2. Fjern teststrimmelen fra den forseglede posen.
3. Dypp stripen i urinen med pilen pekende imot urinen. Ta ut stripen etter 5 sekunder og legg stripen flatt på en ren, tørr, ikke-absorberende overflate (f.eks. på kanten av oppsamlingskoppen). Viktig! Ikke la urinnivået overstige MAX-linjen (markørlinjen), ellers vil ikke testen fungere som den skal.
4. Les resultatet innen 5 minutter. Ikke les resultatet etter mer enn 5 minutter.

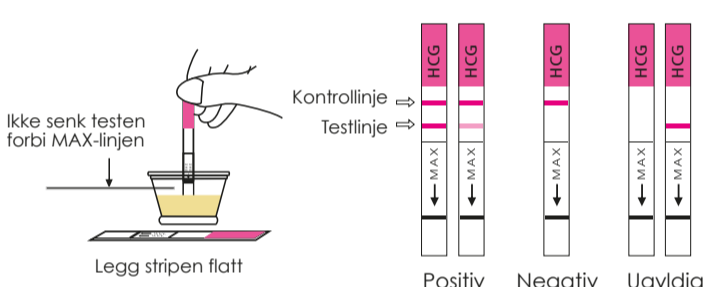

HVORDAN LESES RESULTATENE?

Negativ (ikke gravid):

Bare en farget linje i kontrollsonen vises. Ingen synlig linje i testsonen. Dette indikerer at det ikke er tegn til graviditet.

Positiv (gravid):

Klare fargede linjer vises i kontroll- og testsonen. Dette indikerer at du er gravid.

Ugyldig:

Ingen synlige linjer i det hele tatt, eller det er bare én synlig linje i testsonen, og ikke i kontrollsonen. Ta en ny test.

MERK: Hvis fargen i testsonen er svak, anbefales det at testen gjentas innen 48 timer, eller hvis testen viser negativ, men du mistenker at du er gravid, kan testen gjentas etter noen dager.

HVA SKAL DU GJØRE NÅR DU VET RESULTATET?

HVIS RESULTATET ER POSITIVT (2 STREKER)

Kontakt legen din, som bør bekrefte graviditeten din etter å ha evaluert alle kliniske så vel som laboratorieresultater. Under visse omstendigheter kan testen gi et falskt positivt resultat. Legen din vil også gi deg ytterligere informasjon og råd om graviditeten din. Se også "FORSTÅ TESTRESULTATET".

HVIS RESULTATET ER NEGATIVT (1 STREK)

Hvis du fortsatt tror det er en sjanse for at du er gravid (f.eks. hvis du fortsatt har en fraværperiode av menstruasjon), kan du ta en ny test noen dager senere. Hvis testen fortsatt er negativ, kontakt legen din. Se også "FORSTÅ TESTRESULTATET".

FORSTÅ TESTRESULTATET

1. Hvis en urinprøve er for fortynnet, kan den ikke inneholde et representativt nivå av hCG. Hvis graviditet fortsatt mistenkes, bør en annen urinprøve samles 48 timer senere og testes.

2. Lav konsentrasjon av hCG i en svært tidlig graviditet kan gi et negativt resultat. I dette tilfellet må en ny prøve samles inn minst 48 timer senere og testes.

3. Enhver behandling med hCG kan forårsake falske resultater.

FORVENTEDE RESULTATER

Selv om tidlige hCG nivåer hos normale gravide kvinner er variabel, ser vi denne hCG testen som det mest nøyaktige resultatet den første dagen etter fravær av menstruasjon.

SPØRSMÅL OG SVAR

1. Det er stor forskjell mellom kontrollinjene i to tester. Er dette noe å bekymre seg for?

Nei, forskjellen i fargen på kontrollinjen har ingen innvirkning på resultatet.

2. Kan testresultatene leses etter mer enn 5 minutter?

Nei. Testresultatene må leses innen 5 minutter. Selv om et positivt resultat ikke endres innen flere dager, kan et negativt resultat endres til et falsk positivt svar minutter etter testperioden, som deretter vil gi en villedende test. Det er alltid best å lese resultatet på testtidspunktet på 5 minutter og deretter kaste testen for å unngå forvirring.

YTELSEEGENSKAPER

Følsomhet:

One Step Graviditetstest strimmel har en følsomhet på 10 mIU/ml.

Forstyrrende stoffer:

Følgende potensielt forstyrrende stoffer ble tilsatt til hCG-negative og positive prøver uten forstyrrelser.

Acetaminophen, aspirin, ascorbinsyre, atropin, koffein, glukose, hæmoglobin, tetracyklin, ampicillin, albumin, bilirubin.

Stabilitet etter åpning:

Resultatene fra åpne pakker i stabilitetsstudier viser at produktkvaliteten var stabil og gyldig innen 1,5 timer. Gitt variasjonene i temperatur og fuktighet som kan oppstå, foreslår vi at du bruker testen umiddelbart etter åpning.